

Gebruiksaanwijzing¹


AFBEELDING 1:

De letsels dienen vóór iedere aanwending te worden gereinigd.




AFBEELDING 2:

Breng een dunne laag crème aan op het wondoppervlak, eenmaal of tweemaal per dag afhankelijk van de ernst, totdat de wonde volledig is genezen. Langdurige behandelingen van meer dan een maand dienen door een arts te worden geëvalueerd op basis van de klinische evolutie van het letsel.

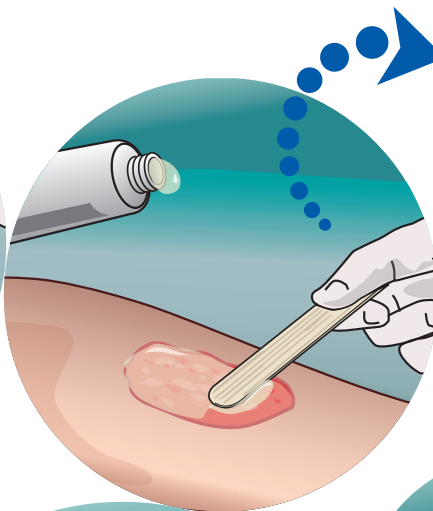


AFBEELDING 3:

Dek bij voorkeur af met steriel niet-adherent verbandmateriaal.

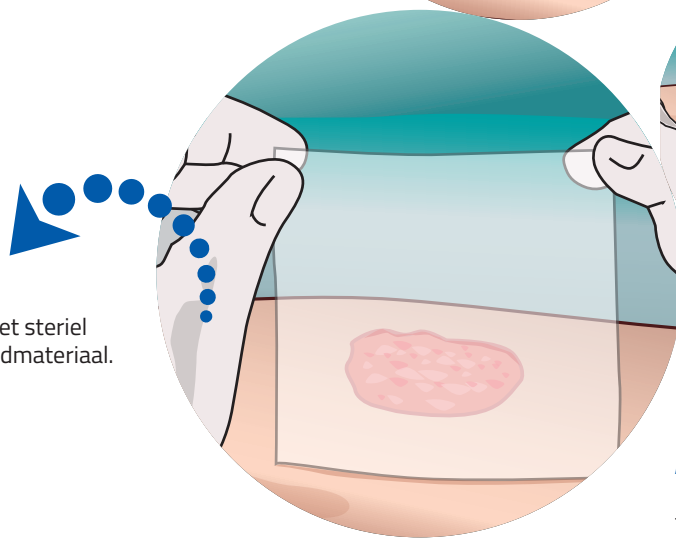

AFBEELDING 4:

Er wordt voorgesteld om een zwachtel aan te brengen zodat er voldoende contact is.

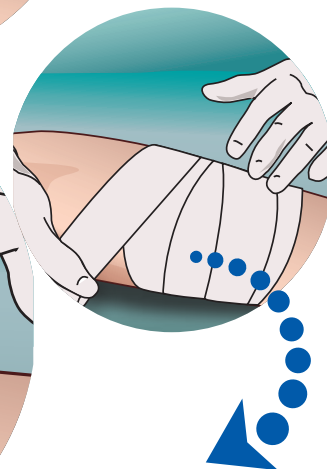

- Niet combineren met quaternaire ammoniumzouten (Cedium benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Hacdil-S en Sterillium) of met lokaal aangebrachte proteolytische enzymen, omdat deze met het product kunnen interageren.

1. Instructies voor gebruik Hyalo⁴ Control crème.

24-Hyalo4-57, Datum laatste herziening: 04/2024